


# ABILANX

## NOTICE SIMPLIFIEE FAUTEUIL GALLOT

### Façade de l'indicateur

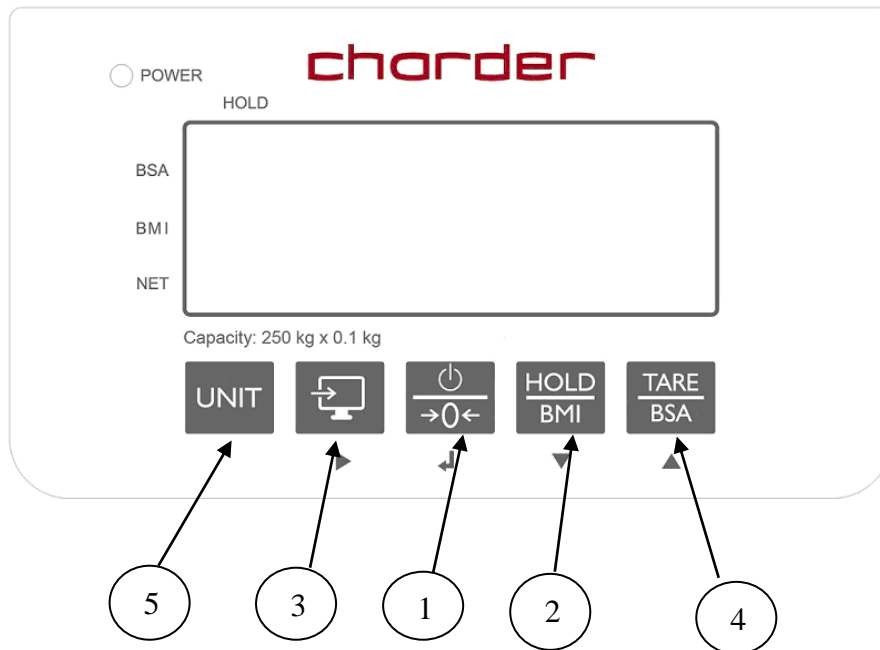

### Touches et fonctions :

- N° 1 ON / OFF : mise en route/extinction et remise à zéro
- N° 2 HOLD/BMI : poids gelé + fonction Indice Masse Corporelle
- N° 3 TRANSFERT : transfert sur clé
- N° 4 TARE : fonction permettant de tarer un poids
- N° 5 UNIT : unité de mesure Kg (fonction bloquée)

**A réception du produit, nous vous conseillons de contrôler immédiatement le bon état et bon fonctionnement du produit.**

# ABILANX

## NOTICE SIMPLIFIEE POUR FAUTEUIL GALLOT

### **A) PROCEDURE POUR DETERMINER LE POIDS DU PATIENT (sans utilisation de la fonction TARE)**

Attention, bien valider que rien ne se trouve sur le fauteuil avant la mise en marche de l'indicateur.

1. Appuyer sur la touche N° 1 pour la mise en route.  
L'indicateur affiche 0.0kg.
2. Positionner le patient sur le fauteuil.  
Bien valider qu'aucun pied ne touche le sol, pour cela utiliser les repose-pieds escamotables.  
L'indicateur affiche alors le poids net du patient.

### **Utilisation de la fonction HOLD :**

1. Lorsque le poids du patient est affiché, appuyer sur la touche N° 2.  
Cette fonction permet de geler le poids affiché du patient, même si ce dernier se retire de l'assise.
2. Redescendre le patient du fauteuil, l'indicateur affiche toujours le poids du patient.
3. Appuyer de nouveau sur la touche HOLD pour une remise à zéro de l'indicateur.  
L'indicateur est à nouveau opérationnel pour une nouvelle pesée.

### **Utilisation de la fonction BMI : indice de masse corporelle**

1. Lorsque l'indicateur affiche le poids du patient, appuyer sur la touche N° 2 en maintenant la pression. Relâcher lorsque vous avez en exemple 170.0 (taille moyenne d'un patient en cm).
2. Utiliser les touches N° 2 et N° 4 pour positionner la bonne valeur sur chaque digit. Appuyer sur la touche 3 afin de passer d'un digit à l'autre.
3. Valider ensuite en appuyant sur la touche N° 1.  
L'indicateur affiche alors l'IMC en % du patient.  
Pour revenir au poids du patient, appuyer sur la touche N° 4.

# ABILANX

## NOTICE SIMPLIFIEE POUR FAUTEUIL GALLOT

### **B) PROCEDURE POUR DETERMINER LE POIDS DU PATIENT (avec utilisation de la fonction TARE)**

- **Mise en route de l'indicateur en appuyant sur la touche N°1**
- **L'indicateur affiche 0.0 kg**
- **Positionner le produit (type coussin ...) sur l'assise, l'indicateur affiche son poids.**
- **Appuyer sur la touche N°4 TARE, l'indicateur affiche 0.0 kg**
- **Positionner le patient sur l'assise**
- **L'indicateur affiche le poids net du patient**
- **Le patient se relève, l'indicateur affiche 0.0 kg**
- **Retirer le produit (type coussin ...), l'indicateur affiche le poids en négatif**
- **Appuyer sur la touche N°4 TARE, l'indicateur affiche de nouveau 0.0 kg.**
- **Le produit est prêt pour une nouvelle pesée.**

#### **Extinction de l'indicateur :**

- Manuelle : appuyer sur touche N° 1
- Automatique : au bout de 2 minutes de non-utilisation, extinction de l'indicateur.

**Fournisseur :**

**Distribué par :**

**Abilanx**  
**PARK AVENUE**  
**RUE LEON GRIFFON**  
**56890 SAINT AVE**  
**Tél : (+33) 02 97 63 70 46**  
**Fax : (+33) 02 97 63 74 90**  
[\*\*contact@abilanx.com\*\*](mailto:contact@abilanx.com)  
[\*\*www.abilanx.com\*\*](http://www.abilanx.com)

ABILANX PARK AVENUE RUE LEON GRIFFON 56890 SAINT AVE  
[contact@abilanx.com](mailto:contact@abilanx.com) [www.abilanx.com](http://www.abilanx.com)