

# Optiseat

Référence : D117930

29-05-2017 - V1.0

## Mode démploi

### Général:

L'Optiseat sans fil alerte lorsque quelqu'un se lève d'une chaise. Si on est plus longtemps debout que le temps défini, l'Optiseat émet une alarme. L'Optiseat est compatible avec les récepteurs et téléavertisseurs Daza.

Le boîtier de commande (Fig.1) comprend un témoin indiquant si le coussin est en position 'marche' ou 'arrêt' (vert ou rouge) et une touche pour activer/désactiver le coussin..

### Vérifiez si le système est activé ou désactivé:

- Appuyez brièvement sur la touche
- Le témoin indique si le système est en position marche ou arrêt. Rouge pour arrêt, vert pour marche.

### Activation et désactivation:

- Maintenir la touche enfoncée 3 secondes.
- Le témoin change de statut et le système est maintenant en position marche ou arrêt.
- Cela est également notifié à l'aide de tonalités : 2 brèves tonalités allumé, 1 brève tonalité éteint.
- Lorsque quelqu'un s'assoit sur le coussin, le témoin du boîtier de commande affiche le statut du système.



Fig 1: Touche et témoin

### Fonction de rappel:

Lorsque le système est désactivé et qu'un client descend de la chaise, lors de la prochaine utilisation de la chaise, le coussin émettra 9 brèves tonalités pour attirer l'attention du personnel soignant sur le fait que le système est désactivé. Ce rappel n'est donné qu'une seule fois de telle sorte que la chaise peut par exemple être utilisée pour une visite sans que le système soit activé.

### Alimentation:

2 piles AA 1,5V (penlite) doivent être placées dans l'Optiseat.

### Fonctionnement standard de l'Optiseat:

- Activer le système
- Lorsque le patient se lève de la chaise, une tonalité retentit pendant 4 secondes (réglable). Cela, afin d'activer une éventuelle capacité auto-correctrice du patient.
- Si le patient ne s'assoit pas dans les 4 secondes, un signal d'appel est envoyé au récepteur ou au pager.
- Si le patient s'assoit dans les 4 secondes, la tonalité s'arrête et il ne se passe rien.

### Avis de piles déchargées:

Lorsque les piles sont déchargées, le témoin clignote rouge/vert toutes les 5 secondes. Si le système est allumé, une tonalité sera également audible toutes les minutes. Si vous attendez trop longtemps pour remplacer les piles, un message de 'pile déchargée' apparaîtra sur le récepteur ou le pager. En cas d'utilisation de plusieurs coussins Optiseat® sur un seul récepteur, on ne peut voir sur le récepteur de quel coussin il s'agit. Vous devez contrôler tous les coussins Optiseat®.

### Divergences par rapport aux paramètres standards:

Le service technique peut modifier les paramètres des temps par défaut et de la vitesse de l'envoi. Voir manuel technique.

# Optiseat

Référence : D117930  
29-05-2017 - V1.0


## Mode démploi

### Ouverture de l'appareil:

Pour l'ouverture de l'appareil, vous devez enlever quatre vis. Les 2 vis inférieures se trouvent dans le compartiment des piles.

### Paramètres internes.

#### Interrupteurs Retard d'alarme S1 + S2

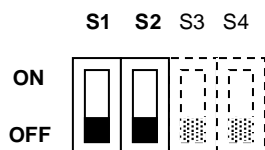

L'Optiseat dispose d'un retard d'alarme. C'est le temps que possède la personne pour revenir s'asseoir avant que l'alarme ne soit déclenchée. 4 périodes peuvent être ici sélectionnées. Ces périodes peuvent éventuellement être modifiées sur demande. Choix parmi ces périodes standard : 1, 4, 15 et 60 sec, autres périodes disponibles en option. Le choix parmi ces 4 périodes s'effectue par les 2 premiers interrupteurs **S1 et S2**

Temps 1 sec. Temps 4 sec (\*). Temps 15 sec. Temps 60 sec.



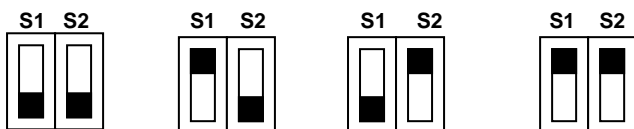


Fig 2 : Retard d'alarme (\* standard)

#### Interrupteurs Ronfleur S3 + S4

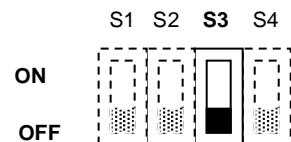

Le troisième interrupteur (**S3**) permet d'activer ou de désactiver le ronfleur. S'il est en haut (**ON**), le ronfleur est audible jusqu'à la fin de la période de retard d'alarme définie. Si **S3** est en bas, (**OFF**), quel que soit la période d'alarme définie, la tonalité ne retentira qu'une seconde au lever.

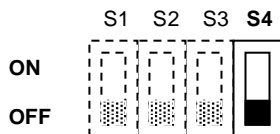

Le ronfleur peut être activé ou désactivé avec le quatrième interrupteur (S4). S'il est allumé (ON), le ronfleur est audible comme indiqué par S3. Si S4 est éteint (OFF), le ronfleur est complètement désactivé en cas d'alarme.

**Lors de la fermeture de l'appareil, veillez à ce que le témoin corresponde bien au trou prévu à cet effet.**

**ATTENTION : Après avoir changé les réglages, l'Optiseat doit être éteint et allumé une fois pour activer les nouveaux réglages!**

**Abilanx** Park Avenue Rue Léon Griffon 56890 Saint Avé

Tél : 02 97 63 70 46 Fax : 02 97 63 74 90 Courriel : [contact@abilanx.com](mailto:contact@abilanx.com) Web : [www.abilanx.com](http://www.abilanx.com)